

Gamma

ТЕХНІКА ДЛЯ ЗДОРОВ'Я

Країна виробник: Швейцарія

Завод виробник: Тайвань

Гарантія 2 роки. Безкоштовне сервісне обслуговування 10 років

Сервісний центр



МОДЕЛЬ SPEAKER


Використовувати тільки
з тест-смужками
GAMMA MS



ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ

1 Вставте тест-смужку в вимкнений прилад.

Дочекайтесь появи індикації
тест смужки "  "
та символу краплі крові "  " на дисплеї.

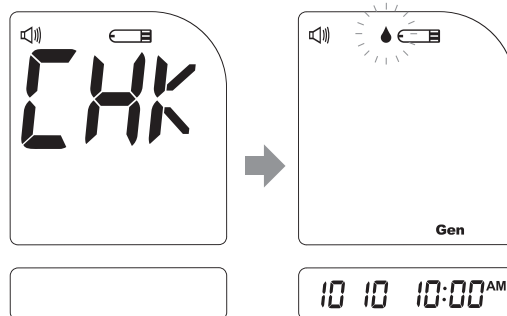


2 Нанесіть пробу.

Піднесіть крапельку крові до торця тест-смужки
в забірний отвір.
Кров всмоктується в забірний отвір і після того,
як контрольне віконце заповнюється повністю,
прилад починає вимір.




3 Через 5 сек. на екрані з'явиться результат

(Наприклад 5.6 ммоль / л)

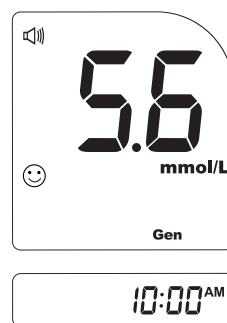

4 Вийміть використану тест-смужку

Після видалення тест-смужки результат
автоматично заноситься в пам'ять
і глюкометр відключається.

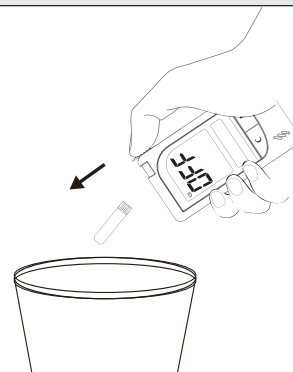

ІНФОРМАЦІЙНА ЛІНІЯ:
0 800 600 103

з 9:00 до 18:00 по буднях, ДІЗВІНИ БЕЗКОШТОВНО ЗІ СТАЦІОНАРНИХ
ТА МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ У МЕЖАХ УКРАЇНИ

