

Gamma

ТЕХНІКА ДЛЯ ЗДОРОВ'Я

Країна виробник: Швейцарія

Завод виробник: Тайвань

Гарантія 2 роки. Безкоштовне сервісне обслуговування 10 років

Сервісний центр



МОДЕЛЬ DIAMOND

Використовувати тільки
з тест-смужками
GAMMA DM




ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ (Голосова підказка)



- 1** Вставте тест-смужку у вимкнений прилад.
Дочекайтеся на екрані символів "  " та "  ".

 Голосова підказка


Дякуємо за використання нашої продукції.
Розслабтеся на час вимірювання.
Піднесіть краплю крові до тест-смужки

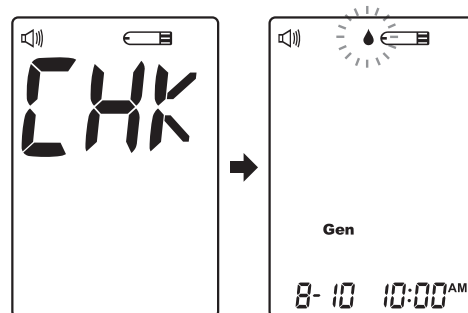

- 2** Нанесіть пробу.
Доторкніться крапелькою крові до входу
в забірний отвір на тест-смужці.
Якщо кількість забраної крові достатня,
контрольне віконце буде повністю заповнено.
НЕ прибирайте палець, поки не почуєте сигнал зумера.

 Голосова підказка

Нанесіть кров на тест-смужку.

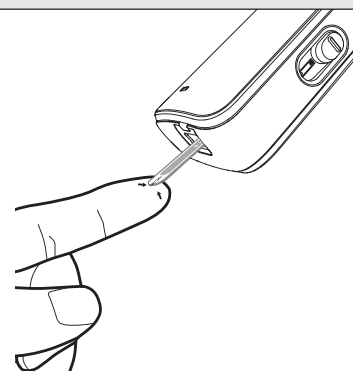


- 3** Через 5 сек. на екрані з'явиться результат
(Наприклад 5.6 ммоль / л)

 Голосова підказка

Вміст глюкози в крові - число та одиниця виміру
(Миллимоль на літр).



- 4** Вийміть використану тест-смужку
Натисніть кнопку збоку приладу.
Після видалення тест-смужки
результат автоматично заноситься
в пам'ять і глюкометр відключається.

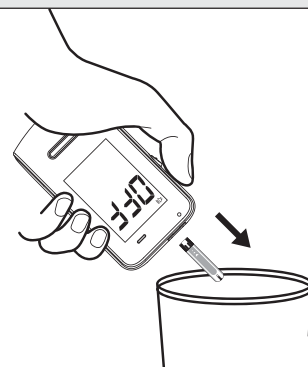

ІНФОРМАЦІЙНА ЛІНІЯ:
0 800 600 103



з 9:00 до 18:00 по буднях, ДІЗВІНИ БЕЗКОШТОВНІ ЗІ СТАЦІОНАРНИХ
ТА МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ У МІЖДІ УКРАЇНИ