




GAMMA-FARM.COM.UA




НАЛАШТУВАННЯ ЛАНЦЕТНОГО ПРИСТРОЮ

- 1 Гніздо - утримувач ланцета
- 2 Штовхач ланцета
- 3 Ручка взводу пружини
- 4 Кнопка спуску
- 5 Замок
- 6 Індикатор замку
- 7 Ковпачок
- 8 Регулятор глибини проколу
- 9 Індикатор глибини проколу
- 10 Стрілка
- 11 Прозорий ковпачок


тільки для альтернативних ділянок забору крові

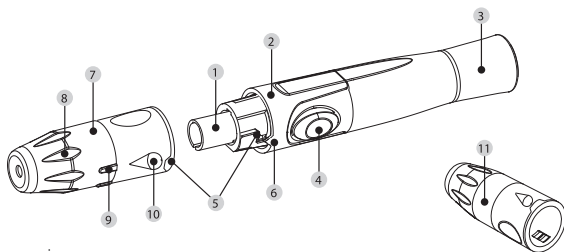


- 1 Поверніть до упору і зніміть ковпачок ланцетного пристрою

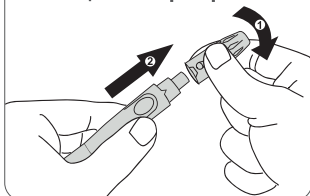


- 2 Вставте ланцет у гніздо

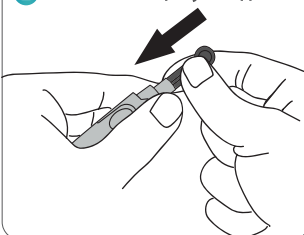


- 3 Відкритіть і зніміть захисний диск з ланцета

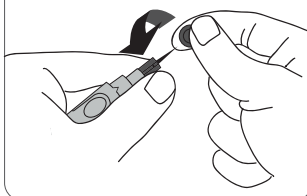


- 4 Одягніть ковпачок ланцетного пристрою і поверніть його до упору

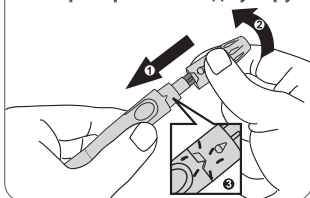

- 5 Оберіть необхідну глибину проколу

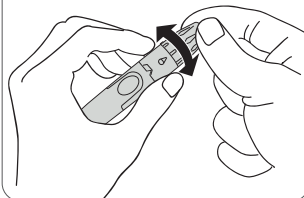

- 6 Для зарядки ланцетного пристрою відтягніть ручку взводу пружини до клацання. Колір всередині кнопки зміниться.

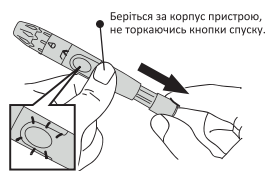

- 7 Проколювання пальця



Міцно притисніть ланцетний пристрій до бокової поверхні подушечки пальця і натисніть кнопку спуску.

- ! Увага! Місце проколу потрібно:**
- вимити і висушити (в домашніх умовах);
 - масажувати 20 сек;
 - протерти 70% - вим розчином спирту (в дорозі);
 - дати йому просохнути.

ЦЕНТР ПІДТРИМКИ З 9:00 до 18:00 по буднях, дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України